




Immunsystem Test

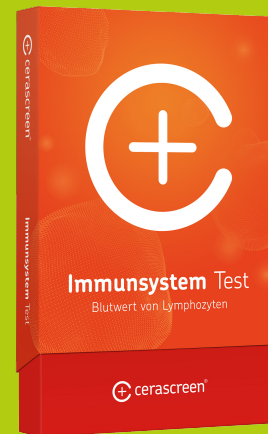

Blutwerte von Lymphozyten

Wie steht es um Ihr Immunsystem?

Der cerascreen® Immunsystem Test misst die Anzahl von fünf verschiedenen Arten von Lymphozyten in Ihrem Blut. Lymphozyten sind eine Untergruppe der weißen Blutkörperchen und spielen eine wichtige Rolle in der Immunabwehr. Ärzt*innen werten Lymphozyten unter anderem als Hinweise darauf, ob eine Infektion vorliegt.

Der cerascreen® Immunsystem Test kann für jeden, der mehr über die eigene Gesundheit erfahren möchte, spannende Einblicke liefern.

Besonders interessant ist er für Menschen, die vermuten, Probleme mit Ihrem Immunsystem zu haben oder deren Immunsystem häufig durch Krankheitserreger gefordert ist.

- + **Probenahme zuhause: Ein Piks in den Finger genügt**
- + **professionelle Auswertung im medizinischen Fachlabor**
- + **Empfehlungen für ein starkes Immunsystem**
- + **nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen**

Unsere Expertise für Sie

Cerascreen® ist Marktführer für medizinische Probenahme- und Einsende-Testkits in Europa, mit über 10-jähriger Erfahrung in der Entwicklung und Auswertung von Tests. Wir haben mehr als 65 diagnostische Testkits für alle Biomarker-Typen entwickelt, mehr als 500.000 Proben ausgewertet und beliefern über 20 Länder.



Testen, welche Probleme es gibt und wie Ihr Körper auf Einflüsse von außen reagiert



Wissen, wie Nährstoffe, Umweltfaktoren und Lebensstil mit Gesundheit und Wohlbefinden zusammenhängen.



Handeln, durch Lebensstil, Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel und gegebenenfalls Therapien. Gesundheit und Leistungsfähigkeit optimieren und Krankheiten vorbeugen.



Wie funktioniert der Test?

1. Zuhause testen



Ihr Testkit enthält alles, was Sie für die Entnahme einer kleinen Blutprobe aus Ihrer Fingerspitze brauchen. Anschließend schicken Sie die Probe im beiliegenden Rücksendeumschlag kostenfrei an unser medizinisches Fachlabor.

2. Ergebnisse online ansehen



Nach der Auswertung im medizinischen Fachlabor erhalten Sie online Zugriff auf Ihren persönlichen Ergebnisbericht.

3. Handeln



Ihr Zugang zu den Testergebnissen sowie zu den evidenzbasierten Erkenntnissen und Tipps, um Ihre Gesundheit zu verbessern: das mein cerascreen®-Nutzerprofil auf unserer Website oder unserer App.

Immunsystem Test

Der Immunsystem Test ist für bestimmte Personengruppen nicht oder nur eingeschränkt geeignet:

- + Menschen mit ansteckenden Krankheiten wie Hepatitis und HIV dürfen den Immunsystem Test nicht durchführen.
- + Menschen mit der Bluterkrankheit (Hämophilie) sollten den Bluttest nicht machen.
- + Schwangere und stillende Frauen sollten den Immunsystem Test nur unter ärztlicher Begleitung durchführen. Für sie gelten auch die Referenzwerte und Empfehlungen nicht oder nur eingeschränkt, sie sollten sich Anweisungen zum Testergebnis von Ihrem Arzt oder Therapeuten einholen.
- + Der Immunsystem Test eignet sich nicht für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.
- + Der Test ist nicht dazu geeignet, Erkrankungen zu diagnostizieren. Leiden Sie unter Grippe-symptomen sollten Sie sich an die bundesweite Hotline des ärztlichen Bereitschaftsdienstes Tel.: 116 117 oder direkt an Ihren Arzt wenden.
- + Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Weitere Informationen zum Immunsystem Test:

<https://www.cerascreen.de/products/immunsystem-test>



PZN 17295962

Dieses Kit kann nur innerhalb Deutschlands
kostenlos zurückgesendet werden.

