

ASPILOS

Alkohol Speicheltest



EAN / PZN
4260688640172 /
19109260



Stück
1 Test




VPE/Karton
160 VPE




Der unangemessene Alkoholkonsum kann zu Unfällen, Verletzungen und zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Dabei ist die Blutalkoholkonzentration, bei der eine Person beeinträchtigt wird, völlig individuell: Jede Person hat spezifische Parameter, die den Grad der Beeinträchtigung beeinflussen, wie etwa Größe, Gewicht, Essgewohnheiten und Alkoholtoleranz.

Mit unserem Alkohol-Selbsttest erhalten Sie eine schnelle, einfache und hochsensible Methode, um den Alkoholgehalt im Speichel zu erkennen. Da die Konzentration von Alkohol im Speichel vergleichbar mit der im Blut ist, garantiert der Schnelltest ein sicheres Ergebnis.

Anwendung

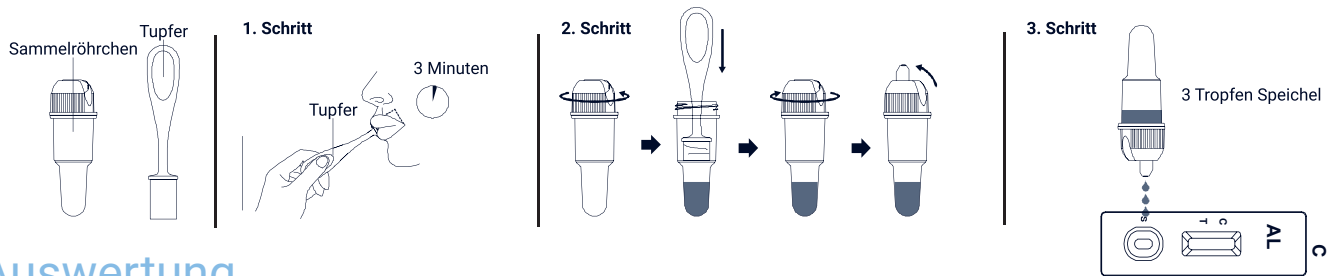

Auswertung

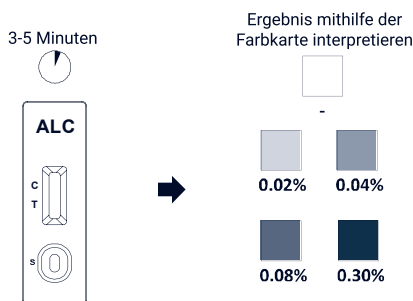

Vorteile

- **Genauigkeit:** Der Alkohol-Selbsttest wurde mit einem handelsüblichen Alkoholttest verglichen. Dabei wurden die Tests an 78 klinischen Proben durchgeführt, die zuvor von freiwilligen Personen gesammelt wurden, die unterschiedliche Mengen an Wein getrunken hatten. Das Gesamtergebnis ist eindeutig: Bei allen Proben wiesen beide Tests dieselben Ergebnisse auf. Demnach hat unser Selbsttest eine Genauigkeit von > 99,9 % und ist damit sehr zuverlässig.
- **Schnelles & sicheres Ergebnis:** Nachdem Sie den Test selbst durchgeführt haben, müssen Sie lediglich 3-5 Minuten warten, bis die Kassette ein zuverlässiges Ergebnis aufzeigt. Vergleichen Sie die Farbe des Reaktionspads mit der Farbkarte, um die relative Blutalkoholkonzentration zu bestimmen.
- **Nicht-invasiv:** Im Gegensatz zu Bluttests ist der Speicheltest nicht invasiv. Es ist keine Nadel erforderlich, was ihn benutzerfreundlich und weniger beängstigend für Personen macht, die vor Nadeln zurückschrecken.

Packungsinhalt

- Testkassette • Tupfer • Sammelröhrchen • Farbkarte • Packungsbeilage